

DE Gebrauchsinformation

Es ist wichtig, dass Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durchlesen, bevor Sie mit der Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe beginnen. Sie fasst die wesentlichen Produktinformationen zusammen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Was ist Xailin® Night Benetzende Augensalbe?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe ist eine konservierungsmittelfreie, weiße, durchscheinende, weiche Salbe, frei von Fremdstoffen im Mehrdosissystem zur nächtlichen Linderung bei Trockenheitsgefühl am Auge. Die Packung enthält 5 g sterile Augensalbe.

Zusammensetzung:

Xailin® Night Benetzende Augensalbe enthält weiße Vaseline 573 mg/g, dickflüssiges Paraffin 425 mg/g und Wollwachsalkohole 2 mg/g, die einen durchsichtigen, gleitfähig machenden, feuchtigkeitbindenden Film auf der Augenoberfläche bilden.

Wann wird es angewendet?

Xailin® Night Benetzende Augensalbe verschafft eine starke, wohltuende Linderung in der Nacht bei Trockenheitsgefühl am Auge, da es als Barriere gegen Feuchtigkeitsverlust wirkt. Ideal für eine Anwendung vor dem Zubettgehen.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe schafft eine wohltuende Linderung der Symptome bei trockenen Augen wie Brennen, Reizung oder Sandkorngefühl. Die Symptome des Trockenen Auges treten aufgrund von Störungen der Augenoberfläche auf. Diese können unterschiedliche Ursachen haben, wenn die normalen Tränen von schlechter Qualität sind oder die Tränenproduktion zu gering ist, um das Auge ausreichend feucht zu halten.

Es besteht keine Altersbeschränkung zur Anwendung von Xailin® Night Benetzende Augensalbe.

Xailin® Night Benetzende Augensalbe kann während der Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Art der Anwendung:

Tragen Sie bei Bedarf in jedes Auge einen dünnen, etwa 1 cm langen Salbenstrang auf, wie nachstehend beschrieben.

Vor der Benutzung einer neuen Tube von Xailin® Night Benetzende Augensalbe, prüfen Sie bitte den Sicherheitsring auf seine Unversehrtheit.

1. Waschen und trocknen Sie Ihre Hände vor der Anwendung gut.
2. Entfernen Sie den Sicherheitsring um das Siegel zu öffnen.
3. Nehmen Sie die äußere Kappe ab.
4. Wenn Sie Kontaktlinsenträger sind, entnehmen Sie Ihre Linsen.
5. Neigen Sie den Kopf nach hinten und schauen Sie nach oben.
6. Ziehen Sie das Unterlid vorsichtig nach unten, sodass sich eine kleine Tasche zwischen Lid und Auge bildet.
7. Halten Sie die Tube zwischen Daumen und Mittelfinger der anderen Hand; drehen Sie die Tube dicht am Auge mit der Spitze nach unten; vermeiden Sie dabei, das Auge mit der Tubenspitze zu berühren.
8. Bringen Sie durch ausreichenden Druck auf die Tube einen dünnen Salbenstrang von etwa 1 cm aus oder wie von Ihrem Arzt, Apotheker oder Optiker angeordnet.
9. Blinzeln Sie mehrere Male.
10. Sollten Sie das Auge verfehlt haben, tragen Sie einen weiteren Salbenstrang auf.
11. Wischen Sie mit einem Tuch sorgfältig überschüssiges Xailin® Night um das Augenlid ab.
12. Wiederholen Sie den Vorgang, falls erforderlich, für das andere Auge.
13. Setzen Sie die äußere Kappe wieder auf das Behältnis. Vermeiden Sie dabei, die Applikatorspitze mit etwas zu berühren, einschließlich Ihres Auges oder Ihrer Finger.
14. Halten Sie zwischen der Anwendung und der anderer Augenarzneimittel einen zeitlichen Abstand von mindestens 30 Minuten ein.

Falls Sie nicht sicher sind, wie Sie Xailin® Night Benetzende Augensalbe anwenden sollen, oder falls Ihre Augenbeschwerden anhalten, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder Optiker.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

- Nicht anwenden, wenn der Sicherheitsring beschädigt ist.
- Nicht anwenden, wenn Sie auf Wollwachsalkohole oder einen der anderen Inhaltsstoffe allergisch reagieren.
- Nicht mit Kontaktlinsen verwenden.
- Verwenden Sie Xailin® Night Benetzende Augensalbe nicht gemeinsam mit einer anderen Person.
- Xailin® Night Benetzende Augensalbe kann nach der Anwendung vorübergehend zu leichtem Brennen und/oder verschwommenem Sehen führen. Warten Sie, bis Sie wieder klar sehen können, bevor Sie ein Fahrzeug führen oder Maschinen bedienen.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden, das auf dem Umkarton oder dem Tubenfalz angegeben ist.
- Zwischen 1°C und 25°C lagern.
- Inhalt 60 Tage nach Anbruch verwerfen.
- Für Kinder unzugänglich und nicht sichtbar aufbewahren.
- Nur zur äußeren Anwendung am Auge, nicht schlucken.
- Entsorgen Sie die angebrochene Tube entsprechend den lokalen Entsorgungsvorschriften.



Zwischen 1°C und 25°C lagern.



Inhalt 60 Tage nach Anbruch verwerfen.



Gebrauchsinformation beachten.



Durch keimfreie Herstellungstechniken sterilisiert.

Xailin® ist eine Handelsmarke von VISUfarma

Stand der Information: Juni 2019

Vertrieb durch VISUfarma BV

Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Niederlande

info@visufarma.com



Medicom Healthcare Ireland Ltd,

Joyce House, 21-23 Holles Street, Dublin 2, Irland



Medicom Healthcare Ltd, Lynton House,

7-12 Tavistock Square, Kings Cross,

London, WC1H 9LT, Vereinigtes Königreich



0123