

UPUTE ZA UPORABU

ULTRASTOP SREDSTVO PROTIV ZAMAGLJIVANJA**15 ml sprej****25 ml boca s kapaljkom****SVOJSTVA**

ULTRASTOP sredstvo protiv zamagljivanja je prozirna, bezbojna otopina koja sadrži kombinaciju površinski aktivnih tvari u alkoholno-vodenoj matrici (etanol, pročišćena voda, < 5 % površinski aktivnih tvari).

Ovaj medicinski proizvod dostupan je u dva oblika na tržištu:

- ULTRASTOP sredstvo protiv zamagljivanja 15 ml sprej
- ULTRASTOP sredstvo protiv zamagljivanja od 25 ml boca s kapaljkom

NAMJENA

ULTRASTOP je sredstvo protiv zamagljivanja namijenjeno za primjenu na medicinskim optičkim instrumentima.

Posebna kombinacija površinski aktivnih tvari na tretiranim površinama stvara bistar i proziran sloj. Zahvaljujući tom vrlo tankom filmu spriječava se stvaranje kapljica i zamagljivanje površine zbog kondenzacije vodene pare.

ULTRASTOP se može koristiti u svrhu smanjivanja zamagljivanja optičkih naočala ili medicinskih zaštitnih naočala tijekom medicinskih pretraga ili kirurških zahvata.

PODRUČJA PRIMJENE

ULTRASTOP je sredstvo protiv zamagljivanja namijenjeno za primjenu na medicinskim dijagnostičkim ogledalima i medicinskim optičkim instrumentima, s kojima se ne mora rukovati strogo aseptički. Trajanje primjene obično traje kraće od 60 minuta.

ULTRASTOP sredstvo protiv zamagljivanja prikladno je za:

- medicinska dijagnostička ogledala (npr. ogledala za larinks i epifarinks, dentalna ogledala) i endoskopske leće (posebice u otorinolaringologiji, za kolonoskopije),
- optičke naočale i medicinske zaštitne naočale,
- leće i ogledala u mikroskopima i drugim medicinskim optičkim instrumentima.

UPUTE ZA PRIMJENU

Ultrastop sredstvo protiv zamagljivanja predviđeno je za stručnu primjenu medicinskog osoblja.

- **Nanošenje otopine**

Manja količina otopine ULTRASTOP sredstva protiv zamagljivanja može se nanijeti izravno ili s pomoću krpice koja ne ostavlja tragove vlakna navlažene otopinom ULTRASTOP na suhu i čistu površinu i ravnomjerno raspoređiti. Ostavite neka kratko djeluje i prema potrebi nakon što ispari nježno ispolirajte površinu suhom, čistom krpicom koja ne ostavlja tragove vlakna.

Pri pravilnoj uporabi ULTRASTOP sredstvo protiv zamagljivanja ne ostavlja mrlje, međutim ako se nanese u predebelom sloju, površine izgledaju malo mutno. U tom slučaju preporučujemo čišćenje površine destiliranom vodom. Nakon toga ponovite opisani postupak.

- **Vrijeme zadržavanja proizvoda na površini i količina proizvoda za primjenu**

Vrijeme zadržavanja proizvoda na površini može se jako razlikovati ovisno o uređajima koji se rabe, telesnim šupljinama koje se tretiraju, eventualnim onečišćenjima leće. Proizvod se uz pridržavanje navedenih uputa za primjenu tijekom zahvata/pretrage može primjenjivati neograničeno.

POSEBNE UPUTE ZA SIGURNU PRIMJENU

- ULTRASTOP sredstvo protiv zamagljivanja prikladno je isključivo za primjenu na staklu i plastičnim materijalima. Ako se na materijalu već nalazi neki sloj ili postoji sumnja glede postojanosti materijala, obratite se proizvođaču ili distributeru predmetnog instrumenta.
- ULTRASTOP sredstvo protiv zamagljivanja sadrži visokopostotni alkohol (etanol). Otvorene boce ili krpice natopljene sredstvom ULTRASTOP čuvajte dalje od izvora vatre kako biste spriječili zapaljivanje otopine.
- Usisna pumpica kapaljke (bočica od 25 ml s kapaljkom) izrađena je od prirodnoga kaučuka, koji kod osjetljivih osoba može uzrokovati alergijske reakcije.

PRIJAVA OZBILJNIH ŠTETNIH DOGAĐAJA

Svaki ozbiljan štetni događaj povezan s ULTRASTOP sredstvom protiv zamagljivanja trebate prijaviti proizvođaču (e-mail: pms@mono.co.at) i nadležnim institucijama:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode – HALMED

Ksaverska cesta 4, 10000 Zagreb – HR

Faks: + 385 1 4884 110, e-mail: medpro@halmed.hr, web stranica: <https://www.halmed.hr/>

UPUTE ZA SKLADIŠTENJE

- Ne skladištiti pri temperaturama višim od 25 °C.
- Zaštititi od svjetlosti.

ROK TRAJANJA

ULTRASTOP se pri pravilnom skladištenju može upotrebljavati do roka navedenoga na kartonskoj ambalaži i etiketi. Rok trajanja odnosi se na zadnji dan u navedenom mjesecu.

Rok trajanja nakon otvaranja:

Nakon prvog otvaranja otopina se treba potrošiti unutar 8 tjedana.

OSTALE VAŽNE INFORMACIJE

Značenje simbola koji se nalaze na etiketi bočice i kutijici ambalaže je sljedeće:

	Proizvođač		Distribucija
	Medicinski proizvod		Broj artikla
	oznaka serije		Upotrebljivo do
	Pridržavajte se uputa za uporabu!		Zaštititi od svjetlosti
	Ne skladištiti pri temperaturama višim od 25 °C		Oprez: vidi „Posebne upute za sigurnu primjenu“

Skenirajte QR-kod na ambalaži za upute na sljedećim jezicima

bg/cs/da/de/el/en/es/et/fi/fr/hr/hu/it/lt/lv/nl/pl/pt/ro/sk/sl/sv.

Proizvođač: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Beč – AT

e-mail: pms@mono.co.at

Distribucija: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, Leystraße 129, 1200 Beč – AT

Stanje informacija: listopad 2021.

