

GEBRAUCHSANWEISUNG

ULTRASTOP pro med. Lösung Monodose**Antibeschlagmittel****EIGENSCHAFTEN**

ULTRASTOP pro med. ist ein steriles Antibeschlagmittel für medizinische Optiken. ULTRASTOP pro med. verhindert zuverlässig ein Beschlagen der Oberflächen medizinischer Optiken. Oberflächenaktive Substanzen in einer speziellen Kombination bilden an den behandelten Oberflächen eine klare und transparente Schicht aus. Dieser sehr dünne Film bewirkt, dass eine Tröpfchenbildung und damit das Beschlagen der Oberfläche durch kondensierten Wasserdampf verhindert wird.

BESTANDTEILE

ULTRASTOP pro med. enthält eine Kombination oberflächenaktiver Substanzen in einer alkoholisch-wässrigen Matrix (Ethanol, gereinigtes Wasser, < 5 % oberflächenaktive Substanzen). Eine Monodose enthält 5 ml.

ANWENDUNGSGEBIETE

ULTRASTOP pro med. ist ein steriles Antibeschlagmittel für medizinische Optiken. ULTRASTOP pro med. Lösung Monodose ist insbesondere geeignet für:

- die Anwendung im Bereich der **streng aseptischen Endoskopie**, welche mit sterilen Geräten in Hohlorganen und Körperhöhlen durchgeführt werden muss (z.B. Laparoskopien, Thorakoskopien, Arthroskopien, etc.), sowie für
- medizinische Untersuchungsspiegel und -optiken (z.B. Larynx- und Epipharynxspiegel, Stroboskope, zahnärztliche Spiegel, Koloskope, etc.).

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

ULTRASTOP pro med. ist für die Anwendung durch medizinisches Fachpersonal vorgesehen.

- **Streng aseptischer Gebrauch**

Beutel an der Randperforation aufreißen, bei Bedarf kann das Fläschchen dann steril hantiert werden. Verwenden Sie den Inhalt des Fläschchens nicht, wenn die Kappe beschädigt ist, da in diesem Fall die Sterilität der Lösung möglicherweise nicht mehr gegeben ist.

Nicht zur Wiederverwendung! Geöffnete Fläschchen unmittelbar verbrauchen!

- **Auftragen der Lösung**

Anwendung bei Handgeräten (wie z.B. Stroboskopen, Handendoskopen etc.):

ULTRASTOP pro med.-Fläschchen durch Abdrehen der Kappe öffnen und Inhalt auf eine geeignete Unterlage tropfen. Die Optik des Handgerätes zur Benetzung gründlich im gut befeuchteten Schwämmchen wenden. Kurz einwirken lassen und nach dem Verdunsten gegebenenfalls mit steriler, nicht fasernder Gaze sanft nachpolieren.

Anwendung bei Standgeräten, die fest montiert oder nur schwer manövrierbar sind:

ULTRASTOP pro med. Fläschchen durch Abdrehen der Kappe öffnen und Inhalt auf sterile, nicht fasernde Gaze auftropfen. Mit der befeuchteten Gaze die zu behandelnde Oberfläche gründlich benetzen. Kurz einwirken lassen und nach dem Verdunsten gegebenenfalls mit steriler, nicht fasernder Gaze sanft nachpolieren.

ULTRASTOP pro med. schmiert bei richtiger Anwendung nicht; jedoch kann bei zu dickem Auftragen die Oberfläche etwas trüb erscheinen. In diesem Fall wird eine Reinigung der Oberfläche mit destilliertem Wasser oder steriler Gaze und eine neuerliche Behandlung, wie oben angeführt, empfohlen.

- **Haftdauer und Anwendungsmenge**

Die Haftdauer kann in Abhängigkeit von den eingesetzten Geräten, der behandelten Körperhöhle, einer eventuellen Verschmutzung der Linse durch Blut oder Gewebe stark variieren. Die Anwendung kann unter

Beachtung der oben angegebenen Anwendungsmenge so oft wiederholt werden wie während des Eingriffs/der Untersuchung erforderlich.

BESONDERE HINWEISE FÜR DIE SICHERE ANWENDUNG

ULTRASTOP pro med. ist zur Anwendung an Glas und Kunststoffen geeignet. Sollten diese Materialien bereits beschichtet sein oder Zweifel an der Beständigkeit eines Materials bestehen, wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller oder Händler des zu behandelnden Gegenstandes.

WARNHINWEISE

- Nicht zur Injektion! Leicht entzündbar!
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren!

LAGERUNGSHINWEISE

- Nicht über 25 °C lagern.
- Lichtschutz erforderlich.

HALTBARKEIT

ULTRASTOP pro med. ist bei ordnungsgemäßer Lagerung bis zu dem auf dem Faltpack und Etikett angegebenen Verfalldatum haltbar. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Haltbarkeit nach Anbruch

Nicht zur Wiederverwendung! Geöffnete Fläschchen unmittelbar verbrauchen!












HANDELSFORMEN

ULTRASTOP pro med. Lösung Monodose: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Lösung Monodose (Clinic)

ULTRASTOP pro med. Lösung, 30 ml

WEITERE WICHTIGE INFORMATIONEN

Die auf dem Flaschenetikett und der Faltschachtel angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

	Hersteller		Artikelnummer
	Chargenbezeichnung		Verwendbar bis
	Gebrauchsanweisung beachten!		Sterilisiert mit aseptischen Verfahren
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Nicht zur Wiederverwendung
	Nicht über 25 °C lagern		Lichtschutz erforderlich
	Nicht zur Injektion! Leicht entzündbar!		

Hersteller: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Wien – AT

Vertrieb: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Wien – AT

Stand der Information: September 2021

CE 0123

STERILE A