

INSTRUCCIONES DE USO

Solución ULTRASTOP pro med. Monodosis

Agente antiempañamiento

CARACTERÍSTICAS

ULTRASTOP pro med. es un agente antiempañamiento estéril para sistemas ópticos médicos. ULTRASTOP pro med. evita de forma eficaz que se empañen las superficies de los sistemas ópticos médicos. Una combinación especial de sustancias tensioactivas forma en las superficies tratadas una capa clara y transparente. Esta fina película evita que se formen gotas, por lo que la superficie no puede empañarse a consecuencia del vapor de agua condensado.

COMPOSICIÓN

ULTRASTOP pro med. contiene una combinación de sustancias tensioactivas en un medio alcohólico/acuoso (etanol, agua purificada, <5 % de sustancias tensioactivas). Una monodosis contiene 5 ml.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

ULTRASTOP pro med. es un agente antiempañamiento estéril para sistemas ópticos médicos. ULTRASTOP pro med. es especialmente adecuado para:

- Su uso durante **endoscopias, proceso que requiere un entorno muy aséptico** y que debe realizarse con dispositivos estériles en órganos huecos y otras cavidades corporales (p. ej. laparoscopia, toracoscopia, artroscopia, etc.).
- Espejos de exploración y sistemas ópticos médicos (p. ej. espejo laríngeo y epifaríngeo, estroboscopia, espejo dental, colonoscopia, etc.).

INDICACIONES PARA SU USO

ULTRASTOP pro med. está diseñado para ser utilizado por personal médico especializado.

- **Uso extremadamente aséptico**

Abra la bolsa por la abertura del extremo y, si es necesario, manipule la ampolla de forma estéril. No utilice el contenido de la ampolla si el tapón está dañado, ya que en este caso es muy probable que la solución ya no sea estéril.

No debe reutilizarse. Utilice las ampollas inmediatamente después de abrirlas.

- **Aplicación de la solución**

Aplicación en aparatos manuales (como estroboscopios, endoscopios manuales, etc.):

Abra la ampolla ULTRASTOP pro med. girando el tapón y deje caer el contenido sobre una superficie adecuada. Para humedecer la óptica del dispositivo manual, gírela completamente con la esponja bien empapada. Dejar que la solución actúe brevemente y, una vez que se haya evaporado, pasar una gasa estéril y sin fibras suavemente por la superficie.

Aplicación en aparatos de pie que estén fijos o sean difíciles de maniobrar:

ULTRASTOP pro med. Abra la ampolla girando el tapón y deje caer el contenido sobre una gasa estéril que no suelte pelusas. Moje bien la superficie que se debe tratar con la gasa humedecida. Dejar que la solución actúe brevemente y, una vez que se haya evaporado, pasar una gasa estéril y sin fibras suavemente por la superficie.

Si se aplica correctamente, ULTRASTOP pro med. no deja manchas, aunque si se aplica demasiada cantidad, la superficie puede tener un aspecto algo opaco. En tal caso recomendamos limpiar la superficie con agua destilada o una gasa estéril y volver a aplicar la solución tal y como se explica anteriormente.

- **Duración del efecto y frecuencia de uso**

La duración del efecto puede variar considerablemente en función de los dispositivos utilizados, de las cavidades del cuerpo de las que se trate y de los posibles restos de sangre o tejido que queden en la

lente. La solución puede utilizarse con tanta frecuencia como sea necesario durante la intervención/exploración, siempre que se tengan en cuenta las indicaciones de aplicación mencionadas anteriormente.

INDICACIONES ESPECIALES PARA UN USO SEGURO

ULTRASTOP pro med. es adecuado para su uso sobre superficies de cristal y de plástico. Si estos materiales ya estuvieran recubiertos o si tuviera dudas sobre su resistencia, póngase en contacto con el fabricante o el distribuidor del objeto en cuestión.

ADVERTENCIAS

- No debe inyectarse. Fácilmente inflamable.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO

- No almacenar a más de 25 °C.
- Se debe almacenar protegido de la luz solar.

CADUCIDAD

Si se almacena correctamente, ULTRASTOP pro med. puede conservarse hasta la fecha de caducidad que aparece en la caja de cartón y en la etiqueta. La fecha de caducidad se refiere al último día del mes indicado.

Caducidad tras su primer uso:

No debe reutilizarse. Utilice las ampollas inmediatamente después de abrirlas.

FORMATOS

ULTRASTOP pro med. Solución, 30 ml en botella con tapón perforable

ULTRASTOP pro med. Solución monodosis: 30 monodosis de 5 ml de la solución ULTRASTOP pro med. (uso clínico)

OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los símbolos que aparecen en la etiqueta de la botella y en la caja plegable tienen el siguiente significado:



Fabricante



Número de artículo



Denominación del lote



Puede utilizarse hasta



Siga las instrucciones de uso



Esterilizado mediante proceso aséptico



No utilizar en caso de embalaje dañado



No debe reutilizarse.



No almacenar a más de 25 °C



Se debe almacenar protegido de la luz solar



No debe inyectarse. Fácilmente inflamable.

Fabricante: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viena – AT

Distribuidor: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viena – AT

CE 0123

STERILE A

Versión de la información: septiembre de 2021

USTP-0005-BP-05