

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ULTRASTOP pro med. Solução unidose

Antiembaciamento

CARACTERÍSTICAS

ULTRASTOP pro med. é uma solução antiembaciamento estéril para óticas médicas. ULTRASTOP pro med. previne eficazmente o embaciamento das superfícies das óticas médicas. As substâncias tensoativas numa combinação especial formam uma camada límpida e transparente sobre as superfícies tratadas. Esta película extremamente fina impede a formação de gotículas e, por conseguinte, o embaciamento da superfície por vapor de água condensado.

COMPONENTES

ULTRASTOP pro med. contém uma combinação de substâncias tensoativas numa matriz hidroalcoólica (etanol, água purificada, <5% de substâncias tensoativas). Uma unidose contém 5 ml.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

ULTRASTOP pro med. é uma solução antiembaciamento estéril para óticas médicas. ULTRASTOP pro med. é particularmente adequado para:

- a aplicação no campo da **endoscopia estritamente assética**, devendo ser realizada com equipamento estéril em órgãos e cavidades corporais ocas (p. ex., laparoscopias, toracoscopias, artroscopias etc.), bem como para
- espelhos e óticas para exames médicos (p. ex., espelhos laringeos e epifaringeos, estroboscópios, espelhos odontológicos, coloscópios etc.).

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO

ULTRASTOP pro med. foi concebido para ser utilizado por profissionais de saúde.

• Utilização estritamente assética

Abra a unidose utilizando a perfuração no topo; se necessário, a unidose pode ser manuseada de forma estéril. Não utilize o conteúdo da unidose caso a tampa esteja danificada, uma vez que, neste caso, não é possível garantir a esterilidade da solução.

Não reutilizar! Utilizar unidoses abertas de imediato!

• Aplicar a solução

Aplicação em aparelhos portáteis (p. ex., estroboscópios, endoscópios portáteis etc.):

Abra a unidose ULTRASTOP pro med., rodando a tampa, e verta o conteúdo para uma superfície adequada. Rode cuidadosamente as óticas do dispositivo portátil na esponja devidamente hidratada para humedecer. Deixe atuar por breves instantes e, se necessário, uma vez evaporada a solução, aplique uma gaze esterilizada não fibrosa.

Aplicação em aparelhos para apoiar no solo ou aparelhos de difícil manuseamento:

ULTRASTOP pro med. Abra a unidose rodando a tampa e verta o conteúdo para uma gaze esterilizada não fibrosa. Hidrate cuidadosamente a superfície a ser tratada com a gaze humedecida. Deixe atuar por breves instantes e, se necessário, uma vez evaporada a solução, aplique uma gaze esterilizada não fibrosa.

ULTRASTOP pro med. não mancha quando usado corretamente, no entanto, se aplicado em excesso, a superfície pode parecer opaca. Neste caso, recomendamos que proceda à limpeza da superfície com água destilada ou gaze esterilizada e realize um novo tratamento, conforme indicado acima.

• Duração e volume de aplicação

A duração pode variar consideravelmente em função dos aparelhos utilizados, da cavidade corporal a tratar ou da contaminação da lente por sangue ou tecido. Se necessário, a aplicação pode ser repetida durante o procedimento/exame, seguindo as instruções de aplicação indicadas acima.

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA UMA UTILIZAÇÃO SEGURA

ULTRASTOP pro med. é adequado para utilização em vidro e plástico. Se estes materiais já se encontrarem revestidos ou se tiver alguma dúvida sobre a resistência de um material, entre em contacto com o respetivo fabricante ou distribuidor do produto em questão.

ADVERTÊNCIAS

- Não injetável! Altamente inflamável!
- Manter fora do alcance das crianças!

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

- Não armazenar a temperaturas superiores a 25 °C.
- Proteger contra a luz.

VIDA ÚTIL

ULTRASTOP pro med. mantém-se inalterado até ao prazo de validade indicado na caixa desmontável e no rótulo, se corretamente armazenado. O prazo de validade refere-se ao último dia do mês indicado.

Vida útil após a abertura:

Não reutilizar! Utilizar unidoses abertas de imediato!

FORMAS COMERCIAIS

ULTRASTOP pro med. Solução, frasco de punção de 30 ml

ULTRASTOP pro med. Solução, unidose: 30 x 5 ml ULTRASTOP pro med. Solução unidose (Clinic)

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Os símbolos apresentados no rótulo do frasco e na caixa desmontável têm o seguinte significado:



Fabricante



Número do artigo



Designação do lote



Válido até



Siga as instruções de utilização!



Esterilizado com procedimentos asséticos



Não utilizar se a embalagem estiver danificada



Não reutilizar!



Não armazenar a temperaturas superiores a 25 °C



Proteger contra a luz



Não injetável! Altamente inflamável!

Fabricante: MoNo chem-pharm Produkte GmbH, Leystraße 129, 1200 Viena – AT

CE 0123

Distribuição: SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH, 1200 Viena – AT



Versão das informações: setembro de 2021